



Einmal Naturmoorpackungen

Bei diesen Packungen wird das naturfeuchte Moor zwischen einer undurchlässigen PE-Folie und einem durchlässigen Vlies eingearbeitet.

Anwendung mit Wärmeträger:

- Den passenden Wärmeträger (Beschreibung nachstehend) auf max. 60 °C erwärmen
- Naturmoorpackung darauf legen, kurz anwärmen lassen
- Mit der durchlässigen Vliesseite auf die zu behandelnde Stelle auflegen
- Wärmeträger darüber legen

Anwendung ohne Wärmeträger:

- Die Naturmoorpackung in der Mikrowelle (ev. Backrohr) auf die gewünschte Temperatur erwärmen (nicht zu heiß)
- Auf die gewünschte Stelle auflegen
- Mit Handtüchern oder Badetuch gut einwickeln.

Die Wirkung bei der Anwendung ohne Wärmeträger ist aufgrund der begrenzten Wärmehaltung wesentlich geringer!

Behandlungsdauer: ca. 15 – 25 Minuten

Anwendungsbereich:

Als Unterstützungsmittel zur lokalen Wärmetherapie bei Erkrankung des Bewegungsapparates!

Nicht anwenden bei Fiebererkrankungen, Tuberkulose, schweren Herz- und Kreislauferkrankungen, Hypertonie, hochentzündlichem Rheumatismus, Hautverletzungen und Hautinfektionen, bei Allergie gegen den Inhalt der Packung!

Bei Auftreten unerwünschter Nebenwirkungen ist immer der Arzt zu befragen!!!

Moorpackung nur einmal anwenden! Geöffnete Packungen sind ehest möglich zu verbrauchen!



Wärmeträger

Ein wichtiger Bestandteil für Applikationen von Einmal-Naturmoorpackungen.

Anwendung:

Der Wärmeträger wird im Wasserbad, Mikrowelle, u.ä. auf max. 60 °C erwärmt und auf die Naturmoorpackung aufgelegt.

Die mit einer pastenartigen Moormasse gefüllten Wärmeträger gewährleisten eine konstante Temperatur während der ganzen Applikationsdauer!

Die Wärmeträger sind wieder verwendbar!
